



ОЧИЩЕННЯ. МОЖЕ БУТИ ВІЗУАЛЬНИМ ТА ПРОСТИМ!

Sekusept™ Pure Clean

РУЧНЕ ПОПЕРЕДНЄ ОЧИЩЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ГНУЧКІ ЕНДОСКОПИ

Очищення медичних інструментів та ендоскопів є передумовою для ефективної дезінфекції.

Sekusept Pure Clean, з його поєднанням складників, допомагає уникнути повторного очищення інструментів, забруднених усіма поширеними речовинами, що зустрічаються в медичній сфері (наприклад, кров, білки, сироватка).

Sekusept Pure Clean – це також:

- Швидка дія
- Ретельне очищення
- Економічна ефективність при низькій концентрації використання



ECOLAB®

www.ecolab.com

Sekusept™ Pure Clean

Ручне попереднє очищення медичних приладів,
включаючи гнучкі ендоскопи

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Sekusept Pure Clean забезпечує високий рівень очищення і є особливо ефективним проти типових забруднень у медичній сфері. Його очищувальні властивості були протестовані та порівняні з іншими миючими засобами, що зараз представлені на ринку, з відмінними результатами (див. графік нижче).

Унікальна суміш складників допомагає видаляти забруднення з інструментів, що сприяє скороченню циклу попереднього очищення та дозволяє уникнути повторного очищення.

ЗРУЧНІСТЬ

Sekusept Pure Clean має світло-блакитний колір, щоб візуально ідентифікувати, що продукт був застосований. Формула з низьким рівнем піноутворення забезпечує відмінну візуалізацію під час використання та легко змивається після очищення.


ЕКОНОМНІСТЬ

Sekusept Pure Clean можна використовувати в низьких концентраціях в діапазоні від 0,3% (3 мл/л) до 1% (10 мл/л), що означає, що на один цикл потрібно менше продукту.

*Порівняння ефективності очищення

Clean порівняно з існуючими на ринку продуктами.

Продукти були протестовані в концентрації 0,5% протягом 2 хвилин без механічного впливу.

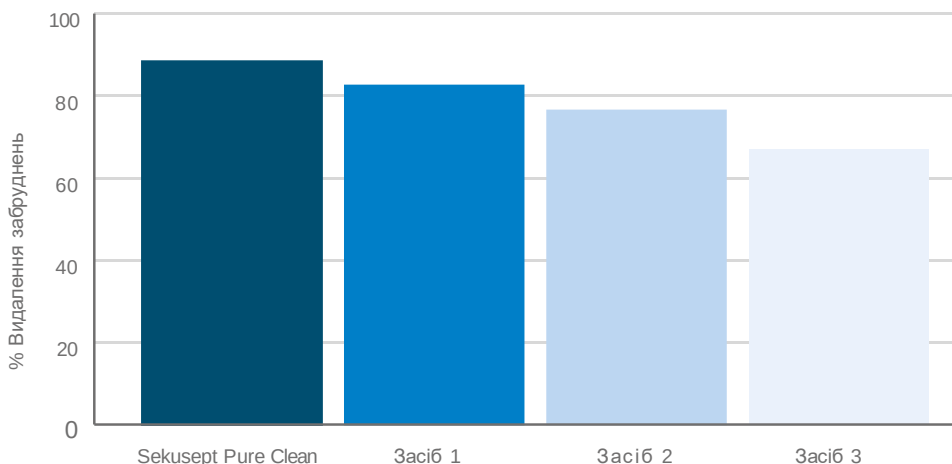

ДОСТУПНІ ПАКУВАННЯ

ПРОДУКТ	ПАКУВАННЯ	
Sekusept Pure Clean	4 x 2 л	
Sekusept Pure Clean	1x 6 л	

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для ручного очищення медичних інструментів, включаючи гнучкі ендоскопи та аксесуари, наприклад хірургічні інструменти та жорсткі ендоскопи, МІС-інструменти.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Залежно від типу та ступеня забруднення, приготуйте розчин 0,3% (3 мл/л) – 1% (10 мл/л) у чистій водопровідній воді.

Занурте інструмент, переконавшись, що всі поверхні повністю змочені. Очистіть предмети відповідно до інструкцій виробника інструменту, включаючи механічну обробку (наприклад, чищення щіткою, протирання), до досягнення візуальної чистоти. При використанні в ультразвуковій ванні тримайте ванну закритою під час обробки ультразвуком.

Промийте водою якості не гірше питної та висушіть зовнішні поверхні та внутрішні канали (наприклад, ендоскопів).

СКЛАДНИКИ

Неіонні поверхнево-активні речовини, комплексоутворювачі, регулятор рН, підсилювач та барвник.

ЗБЕРІГАННЯ

Небезпечно – дотримуйтесь заходів безпеки при використанні (Складено відповідно до діючих європейських правил щодо класифікації та маркування хімічних продуктів). Зберігання: при температурі від +5°C до +25°C.

СЕРТИФІКАТИ

На вимогу ми радо надамо вам сертифікати.

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Будь ласка, прочитайте етикетку та інформацію про продукт



ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

