

Инструкция по применению



Liquides® 5%

Гипохлорит натрия 5%

Раствор для промывания корневых каналов

Назначение

Liquides 5% предназначен для промывания корневых каналов полостей зубов верхней и нижней челюсти в качестве антибактериального средства после лечения воспалительных процессов и инструментальной обработки канала.

Свойства

Препарат представляет собой водный раствор гипохлорита натрия концентрацией 5% с добавкой стабилизатора. Стабилизированный раствор в течение продолжительного времени хорошо сохраняет бактерицидные свойства раствора. Liquides 5% щадяще воздействует на слизистую оболочку полости рта.

Способ применения

Необходимое количество Liquides 5% набирают шприцом из флакона, наносят на ватную турунду, которую помещают в корневой канал и оставляют на 5-10 минут. После чего турунду извлекают, а остатки Liquides 5% смывают водой. Затем канал высушивают

Редакция 03.2021

сжатым воздухом. Далее можно приступать к заполнению канала выбранным пломбировочным материалом.


Предупреждение

В процессе хранения в растворе могут образовываться кристаллы, что не влияет на свойства раствора.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

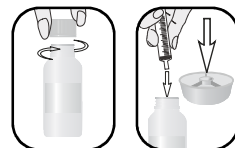

Только для профессионального использования



Інструкція по застосуванню



Liquides® 5%

Гіпохлорит натрію 5%

Розчин для промивання кореневих каналів

Призначення

Liquides 5% призначений для промивання кореневих каналів порожнин зубів верхньої та нижньої щелепи у якості антибактеріального засобу після лікування запальних процесів та інструментальної обробки каналу.

Властивості

Liquides 5% представляє собою водний розчин гіпохлориту натрію концентрацією 5% з добавкою стабілізатора. Стабілізований розчин протягом тривалого часу добре зберігає бактерицидні властивості. Liquides 5% дбайливо впливає на слизову оболонку ротової порожнини.

Спосіб застосування

Необхідну кількість Liquides 5% набирають шприцом з флакона, наносять на ватну турунду, яку розташовують у кореновому каналі і залишають на 5-10 хвилин. Після чого турунду витягають, а залишки Liquides 5% змивають водою. Потім канал висушують стисненим

Редакція 03.2021

повітрям. Далі можна приступати до заповнення каналу обраним пломбувальним матеріалом.


Попередження

В процесі зберігання у розчині можуть утворюватися кристали, що не впливає на властивості розчину.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
Тел. + 380577332697
www.latus.com.ua

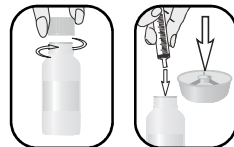

**Тільки для
професійного
використання**

