

ЗГІДНО  
Висновку державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи Держпродспоживслужби  
від 24.12.2019 № 12.2-18-1/28755

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор  
ТОВ «Бланідас»  
Красько О.О.  
«27» грудня 2019 р.

**Інструкція**  
щодо застосування засобу  
**Bilysna anti corrosion (Білизна анти іржа)**

Ця інструкція визначає умови застосування засобу «Bilysna anti corrosion (Білизна анти іржа)» виробництва ТОВ «Бланідас», Україна (Компанія сертифікована за стандартами ISO 9001) з метою якісного очищення хірургічних інструментів від корозії в лікувальних установах різного профілю та інших інструментів виготовлених з металу.

**Загальні положення.**

«Bilysna anti corrosion (Білизна анти іржа)» – готовий рідкий миючий засіб для очищення металевих інструментів від корозії (хірургічні, манікюрні інструменти тощо) .

**Склад засобу, мас. %:** фосфорна кислота – 5, інгібітори корозії, стабілізатори, вода.

«Bilysna anti corrosion (Білизна анти іржа)» – якісно видаляє застарілу іржу, біологічні забруднення, відкладення окису заліза. Забезпечує високоякісну роботу замкових частин інструментів. Можливість використання в ультразвукових ваннах. Багаторазове використання готового розчину.

**Приготування робочого розчину засобу:**

Засіб готовий до застосування, використовується багаторазово. У випадку значного помутніння, випадання в осад та зміни кольору, засіб потрібно замінити.

**Спосіб використання:** Необхідну кількість засобу налити в ємність, занурити інструментарій, витримати 30 хв. Сильне забруднення видалити за допомогою щітки, змоченої засобом. По закінченню експозиції вийняти інструменти та промити під проточною водою не менше 5 хв.

При використанні засобу потрібно здійснювати візуальний контроль кожні 10 хв.

**Особливості застосування:** Всі роботи з засобом слід проводити в спеціальному одязі, захищати руки гумовими рукавичками, уникати попадання в очі та на шкіру. Використовувати тільки для інструментів з медичної сталі.

**Пакування, транспортування, зберігання.**

Засіб фасують у флакони по 1000 мл та каністри по 5 л.

Засоби в упаковці перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Зберігати в оригінальній упаковці, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності: 2 роки з дати випуску.

ТУ У 24.5-36257034-008:2011

Дата останнього перегляду  
Інженер з якості  
ТОВ «Бланідас»  
Плахотнюк М.О.  
«27» 12 2019 р.