

**Інструкція**  
**для медичного застосування**  
**Кето-тест**  
**(Набір реактивів для експрес-аналізу ацетону в сечі)**

Реагенти допоміжні для клінічних лабораторних досліджень  
**ТУ У 24.4-20650786-003:2010**




**Склад:** сухий порошок, що містить карбонат натрію, нітропрурид натрію, амінооцтову кислоту.

**Спосіб застосування**

Покладіть на смужку фільтрувального паперу близько 0,2 г порошку суміші реактивів і нанесіть піпеткою дві краплі досліджуваної сечі. Через 1 хвилину колір порошку треба зрівняти з кольоровою шкалою. За відсутності ацетону в сечі колір порошку не зміниться.

Присутність ацетону в сечі залежно від концентрації призводить до змін кольору порошку від світло-фіолетового до темно-фіолетового.

Стандартна шкала для напівкількісного визначення результатів експрес-аналізу ацетону в сечі:

Слабо позитивна реакція	Позитивна реакція	Різько позитивна реакція
+	++	+++
		

*Примітка.* Під час роботи флакон відкритим не залишати.

**Термін і умови зберігання**

Кето-тест зберігають в сухому місці при температурі +2+20 °С. Термін придатності - 12 місяців від дня виготовлення. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

**Упаковка**

По 5 г Кето-тесту у флаконах пеніцилінових ФЛП упакованих по 5 флаконів в коробках картонних.

**Виробник:** ТОВ "Генезіс", Україна.

**Адреса:** 27503, м.Світловодськ, Кіровоградська обл., вул.Єгорова, 41.