



Tempolat®-LC



Цемент пломбувальний
тимчасовий світлотверднучий



Уважно ознайомтесь з цією інструкцією, перш ніж почати використовувати виріб.

1. Використання за призначенням

Призначення

Tempolat-LC призначений до застосування в терапевтичній стоматології для тимчасового пломбування і покриття лікарського препарату при лікуванні карієсу і некаріозних уражень зубних тканин.

Цільова група пацієнтів

Пацієнти з постійними зубами.

Цільові користувачі

Стоматологічні клініки, стоматологічні кабінети та лікарі-стоматологи.

Сфера застосування

Тільки для стоматологічного використання.

Опис

Tempolat-LC - це світлотверднучий композит (фотополімеризація в ротовій порожнині). Випускається в кольорах за шкалою Vita A2 і A3 в полімерному контейнері та кольору В3, як універсальний, в шприці.

Паста цементу має високу пластичність, не липне до інструменту і добре фіксується в порожнині зуба. Міцність затверділого цементу забезпечує як надійне закриття порожнини, так і легке видалення його після закінчення лікувальної процедури. Цемент має високу водостійкість і не схильний до дезинтеграції. Глибина затвердіння при засвітленні протягом 40 секунд складає не менше 3 мм.

Протипоказання та небажані побічні ефекти

Підвищена індивідуальна чутливість на складові інгредієнти. Індивідуальна непереносимість.

Взаємодія з іншими препаратами

Матеріали, що містять еugenol/олію гвоздики можуть перешкоджати полімеризації матеріалів на основі метакрилатів. Треба уникати застосування цих матеріалів разом з Tempolat-LC.

Дезінфекційні засоби з окислювальною дією (наприклад, перекис водню) можуть взаємодіяти з системою ініціатора, а це може впливати на процес затвердіння.

Вміст комплекту

25 г пасти Tempolat-LC в контейнері.

5 г пасти Tempolat-LC в шприці.

Склад

Діоксид кремнію (70%), Bis-GMA, триетиленгліколь диметакрилат, камфорхінон.

2. Спосіб застосування

Порожнину препарують, очищують і проводять заплановану лікувальну процедуру (купірування запального процесу, депульпування, пломбування кореневого каналу і тому подібне). В разі застосування водного або спиртового розчину лікувального препарату, після внесення його до порожнини, роблять підсушку стисненням повітрям 15 секунд. Після цього частину порожнини, що залишилася, заповнюють за допомогою гладилки цементом, не здійснюючи фотополімеризації формують прикус, наприклад, через шар алюмінієвої фольги або поліпропіленової плівки, видаляють фольгу і надлишки матеріалу.

Полімеризацію пломби здійснюють на відстані 2-3 мм протягом 40 секунд фотополімеризатором.

Для усунення незначного липкого шару після полімеризації необхідно протерти пломбу ватним тампоном, змоченим спиртом.

3. Інформація щодо безпеки

Запобіжні заходи

Не залишати будь-яку кількість матеріалу на зубах або в ротовій порожнині. Не ковтати матеріал! Уникати потрапляння матеріалу в очі. При випадковому контакті з очима: негайно ретельно промити очі рідиною для промивання очей або водою. При проковтуванні: звернутися до лікаря, якщо з'явилися або не проходять скарги.

Використовувати захисні окуляри і лицюву маску!

Уникати контакту з одягом, оскільки матеріал не можна видалити за допомогою хімістки.

Попередження

Стоматолог повинен передбачити можливість алергічних реакцій на компоненти продукту у свого пацієнта, перед процедурою повинен ознайомити пацієнта зі складовими інгредієнтами.

Стоматологи є єдиними особами, що несуть відповідальність, які можуть оцінити умову на користь або шкоду стоматологічного лікування.

При дотриманні вимог інструкцій по застосування побічні дії не спостерігаються.

Залишкові ризики

Відомі залишкові клінічні ризики:

- відсутність адгезивної фіксації (втрата пломби),
- чутливість після втручання,
- ковтання матеріалу.

Термін придатності і умови зберігання

Зберігати при температурі 0 - 25 °C. Не залишати відкритим контейнер з пастою при денному світлі. Матеріал може передчасно полімеризуватися під дією світла. Після використання матеріал щільно закрити.

Не використовувати продукт після закінчення терміну придатності. Дата закінчення терміну придатності: див. інформацію, зазначену на контейнерах і упаковках.

Перед використанням візуально огляньте упаковку і виріб на наявність пошкоджень.

Виробник:


ПП «Латус», 61010 м. Харків, вул. Текстильна, 82

тел. +380577332697, www.latus.com.ua

Інформація про утилізацію

Утилізацію медичного виробу та складових комплекту виконують відповідно до вимог національного законодавства у галузі охорони навколишнього середовища та здоров'я та (або) відповідно до вимог медичного закладу в галузі біологічної небезпеки

У разі будь-якого серйозного інциденту, який трапився з виробом, або виникнення побічних реакцій при використанні виробу, просимо повідомляти виробнику будь-яким способом зв'язку: Україна, 61010, м. Харків, вул. Текстильна, 82, тел. +380577332697 або e-mail: latus@latus.com.ua. При порушенні встановлених виробником умов зберігання та транспортування повідомлення розглядаються як необґрунтовані.

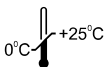

Матеріал розроблений виключно для застосування в стоматології. Використання має проводитися тільки відповідно до інструкції по застосуванню.

