



# Calcisole<sup>®</sup>-C

## Паста гидроксидкальциевая регенерирующая

### Назначение

Calcisole-C предназначен к применению в стоматологии для:

- временного пломбирования корневых каналов зуба;
- лечения при перфорациях и трещинах;
- непрямого покрытия пульпы при лечении глубокого кариеса;
- прямого покрытия пульпы зуба в случае ее обнажения или при использовании метода витальной ампутации.

### Свойства

Calcisole-C представляет собой готовую к применению пасту белого цвета, приготовленную на водной основе. Высокое содержание гидроксида кальция (42%) создает повышенную щелочную реакцию (до pH 12), стимулирует регенерационные процессы в тканях зуба, стабилизирует жизнеспособность зуба и оказывает антимикробное действие. Calcisole-C активно помогает во восстановлению пульпы и способствует формированию вторичного дентина. Паста рентгеноконтрастна.

### Способ применения

Перед наложением Calcisole-C подготовленную кариозную полость высушивают тампоном.

Наносят Calcisole-C послойно до желаемой толщины. Дают просохнуть каждому слою или осторожно высушивают струей воздуха.


Не следует применять Calcisole-C у самых краев кариозной полости, в противном случае необходимо удалить прилипшую к ним пасту. Затем ставят подкладку и пломбу.

При пломбировании корневых каналов, прежде всего проводят их механическую и химическую обработку (1% раствор перекиси водорода или гипохлорита натрия), вводят пасту соответствующим инструментом, а после ставят пломбу. Затем проводят рентгенологический контроль качества пломбирования канала. Если пломбировочный материал выведен за верхушку корня, это может вызвать дискомфорт (чувствительность при накусывании или припухлость). Как правило, эти явления исчезают в течение 24-48 часов.

### Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»  
61010 г. Харьков  
ул. Текстильная, 82  
тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

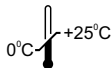

**Только для профессионального использования**





# Calcisole<sup>®</sup>-C

Паста гідроксидкальцієва  
регенеруюча

## Призначення

Calcisole-C призначений до застосування у стоматології для:

- тимчасового пломбування кореневих каналів зуба,
- лікування при перфораціях та тріщинах,
- непрямого покриття пульпи при лікуванні глибокого карієсу,
- прямого покриття пульпи зуба у випадку її оголення або при застосуванні методу вітальної ампутації.

## Властивості

Calcisole-C представляє собою готову до застосування пасту білого кольору, приготовану на водній основі.

Високий вміст гідроксиду кальцію (42%) утворює підвищену лужну реакцію (до pH 12), стимулюються регенераційні процеси в тканинах зуба, стабілізує життєдіяльність зуба та чинить антимікробну дію. Calcisole-C активно допомагає відновленню пульпи і сприяє формуванню вторинного дентину.

Паста рентгеноконтрастна.

## Спосіб застосування

Перед накладанням Calcisole-C підготовлену каріозну порожнину висушують тампоном.

Наносять Calcisole-C пошарово до бажаної товщини. Дають просохнути кожному шару або обережно висушують струменем повітря.

Не слід використовувати Calcisole-C біля самих країв каріозної порожнини, у

противному разі потрібно видалити прилипшу до них пасту. Потім ставлять підкладку і пломбу.


При пломбуванні корневих каналів, перш за все проводять їх механічну та хімічну обробку (1% розчином перекису водню або гіпохлориту натрію), вводять пасту відповідним інструментом, а потім ставлять пломбу.

Після цього проводять рентгенологічний контроль якості пломбування каналу. Якщо пломбувальний матеріал виведений за верхівку кореня, це може викликати дискомфорт (чутливість при накусиванні або припухлість). Як правило, ці явища зникають протягом 24-48 годин.

## Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»  
61010 м. Харків  
вул. Текстильна, 82  
тел. + 380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

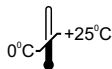

**Тільки для  
професійного  
використання**

