

Инструкция по применению



Therabond®

Адгезив химического отверждения

Назначение

Therabond предназначен к применению в качестве адгезионного агента по эмали и дентину под пломбировочные композиционные материалы химического отверждения любого типа.

Свойства

Therabond обладает высокой и стабильной адгезией к протравленным фосфорной кислотой эмали, дентину и к прокладкам из стеклоиономерных, поликарбоксилатных и композиционных цементов. Therabond не содержит растворителей и не требует просушивания после нанесения.

Способ применения

Therabond применяют по предварительно протравленным фосфорнокислым гелем поверхностям эмали и дентина.

Продолжительность травления дентина составляет 15 секунд, эмали-30-60 секунд.

Промывка водой после травления-15-20 секунд, сушка сжатым воздухом 10-15 секунд.

После просушивания в кювету помещают по 1 капле основной и катализаторной жидкостей адгезива и интенсивно перемешивают шпателем в течении 10-15 секунд.

Готовый адгезив сразу после перемешивания наносят аппликатором или кисточкой на протравленную поверхность зуба и стенки кариозной полости втирающими движениями в течении 5 секунд, без последующего просушивания.

Рекомендации. Therabond следует наносить в 2 слоя.

Пломбировочный материал можно вносить в полость сразу после высушивания, не дожидаясь

Редакция 09.2020

окончательного отверждения адгезива.

Кювету и шпатель очищают спиртом от адгезива до его отверждения.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материалы плотно закрыть.



ЧП «Латус»
61010 г. Харьков,
ул. Текстильная, 82
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

Только для профессионального использования



UA.TR.002



Інструкція по застосуванню



Therabond®

Адгезив хімічного
твердіння

Призначення

Therabond призначений для застосування в якості адгезійного агента по емалі та дентину під пломбувальні композиційні матеріали хімічного твердіння будь-якого типу.

Властивості

Therabond володіє високою та стабільною адгезією до протруєних фосфорною кислотою емалі, дентину та до прокладок зі склоіономерних, полікарбоксилатних, та комозитних цементів. Therabond не містить розчинників і не вимагає просушування після нанесення.

Спосіб застосування

Therabond застосовують по попередньо протруєним фосфорнокислим гелем поверхням емалі та дентину.

Тривалість протруєння дентину становить 15 секунд, емалі-30-60 секунд.

Промивання водою після протруєння-15-20 секунд, сушка стисненим повітрям-10-15 секунд.

Після просушування в кювету поміщають по 1 крапле основної та каталізаторної рідин адгезиву та інтенсивно перемішують шпателем протягом 10-15 секунд.

Готовий адгезив відразу після перемішування наносять аплікатором або пензликом на протруєну поверхню зуба і стінки каріозної порожнини втираючими рухами протягом 5 секунд, без подальшого просушування.

Рекомендації. Therabond слід наносити у 2 шари.

Пломбувальний матеріал можна вносити в порожнину відразу після висушування, не чекаючи остаточного затвердіння адгезиву.

Кювету і шпатель очищають

Редакція 09.2020

спиртом від адгезиву до його затвердіння.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріали щільно закрити.



ПП «Латус»

61010 м. Харків,

вул. Текстильна, 82

Тел. + 380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**



UA.TR.002

