



# Tempolat®-LC

Цемент пломбувальний  
тимчасовий  
світлотверднучий

## Призначення

Tempolat-LC призначений до застосування в терапевтичній стоматології для тимчасового пломбування і покриття лікарського препарату при лікуванні карієсу і некаріозних поразок зубних тканин.

## Властивості

Tempolat-LC є композиційним матеріалом.

Паста цементу забарвлена в універсальний колір (приблизно В3 за шкалою Vita), має високу пластичність, не липне до інструменту і добре фіксується в порожнині, яка пломбується.

Міцність затверділого цементу забезпечує як надійне закриття порожнини, так і легке видалення його після закінчення лікувальної процедури. Цемент має високу водостійкість і не схильний до дезинтеграції.

Глибина твердіння при засвітленні протягом 40 секунд складає не менш 3 мм.

## Спосіб застосування

Порожнину препарують, промивають і проводять заплановану лікувальну процедуру (купірування запального процесу, депульпування, пломбування кореневого каналу і тому подібне). При цьому не слід застосовувати лікувальні засоби, що містять резорцин, евгенол, гваякол, пентахлорфенол, метилсаліцилат і препарати таніну. В разі застосування водного або спиртового розчину лікувального препарату, після внесення

його до порожнини, роблять підсушку стисненим повітрям 15 секунд. Після цього частину порожнини, що залишилася, заповнюють за допомогою гладилки цементом, не здійснюючи фотополімеризації формують прикус, наприклад, через шар алюмінієвої фольги або поліпропіленової плівки, видаляють фольгу і надлишки матеріалу.

Полімеризацію пломби здійснюють на відстані 2-3 мм протягом 40 секунд фотополімеризатором.


Для усунення незначного липкого шару після полімеризації необхідно протерти пломбу ватяним тампоном, змоченим спиртом.

## Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»  
61010, м. Харків  
вул. Текстильна, 82  
Тел. +380577332697  
www.latus.com.ua

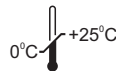

**Тільки для  
професійного  
використання**





# Tempolat®-LC

Цемент пломбировочный  
временный  
светоотверждаемый

## Назначение

Tempolat-LC предназначен к применению в терапевтической стоматологии для временного пломбирования и покрытия лекарственного препарата при лечении кариеса и некариозных поражений зубных тканей.

## Свойства

Tempolat-LC представляет собой композиционный материал.

Паста цемента окрашена в универсальный цвет (примерно В3 по шкале Vita), имеет высокую пластичность, не липнет к инструменту и

хорошо фиксируется в пломбируемой полости.

Прочность отвержденного цемента обеспечивает как надежное закрытие полости, так и легкое удаление его после окончания лечебной процедуры. Цемент обладает хорошей водостойкостью и не подвержен дезинтеграции.

Глубина отверждения цемента при засвечивании в течение 40 секунд составляет не менее 3 мм.

## Способ применения

Полость препарируют, промывают и проводят запланированную лечебную процедуру (купирование воспалительного процесса, депульпирование, пломбирование корневого канала и т.п.). При этом не следует применять лечебные средства, содержащие резорцин, эвгенол, гваякол, пентахлорфенол, метилсалицилат и препараты таннина. В случае применения водного или спиртового

раствора лечебного препарата после внесения его в полость делают подсушку сжатым воздухом 15 секунд. После этого оставшуюся часть полости заполняют при помощи гладилки цементом, не засвечивая формируют прикус, например, через слой алюминиевой фольги или полипропиленовой пленки, удаляют фольгу и излишки материала.

Полимеризацию пломбы осуществляют на расстоянии 2-3 мм в течении 40 секунд фотополимеризатором.


Для удаления незначительного липкого слоя после полимеризации необходимо протереть пломбу ватным тампоном, смоченным спиртом.

## Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»  
61010 г. Харьков  
ул. Текстильная, 82  
Тел. +380577332697  
www.latus.com.ua

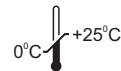

**Только для  
профессионального  
использования**

