



Lateglint®

Лак-глазурь
светоотверждаемый

Назначение

Lateglint предназначен к использованию при финишной отделке пломбы для придания ей высокого блеска, устранения мелких дефектов пломб и эмали.

Свойства

Lateglint обладает хорошей адгезией к композиционному материалу и протравленной фосфорной кислотой эмали. После фотополимеризации на поверхности образуется твердая глянцевая поверхность, не требующая дополнительной полировки.

Способ применения

Lateglint применяют одним из следующих способов (до полимеризации и после кратковременной 5-секундной

полимеризации):

- В первом случае формируют пломбу. Небольшую каплю Lateglint выдавливают из флакона-капельницы на кисточку и равномерно наносят на поверхность пломбы. Для лучшего растекания глазури и заполнения ею мелких дефектов пломбы (раскрыты пузырьки воздуха, царапины, выкрашивание, трещины) пломбу обдувают сухим сжатым воздухом 10-15 секунд, после чего проводят фотополимеризацию. Полировка пломбы после нанесения глазури, как правило, не требуется.

- Во втором случае глазуровка пломбы выполняют после 5-секундной полимеризации пломбы и обработки ее алмазной головкой и абразивным инструментом. При этом не допускается применение силиконовых головок и абразивных паст. Поверхность пломбы и соседние участки эмали должны быть абсолютно чистыми и сухими. Нанесенную глазурь в этом случае полимеризуют одновременно с окончательной полимеризацией пломбы в течение 40 секунд. При покрытии глазурью всей поверхности зуба, ее предварительно протравливают фосфорноокислым гелем в течение 30 секунд и обрабатывают адгезивом.

Примечание. Глазурь имеет вязкую консистенцию. Поэтому рекомендуется флакон выдержать в горизонтальном положении или наклоненным колпачком вниз для заполнения носика пробки-капельницы.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»

61010 г. Харьков, ул. Текстильная, 82


Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

Только для профессионального использования



UA.TR.002

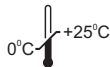

Інструкція по застосуванню



Lateglint®

Лак-глазур світлотвердний

Призначення

Lateglint призначений до використання при фінішній обробці пломби для додання їй високого блиску, усунення дрібних дефектів пломбі емалі.

Властивості

Lateglint має гарну адгезію до композиційного матеріалу і протруєної фосфорною кислотою емалі. Після фотополімеризації на поверхні пломби утворюється тверда глянцева поверхня, що не вимагає додаткового полірування.

Спосіб застосування

Lateglint застосовують одним із таких способів (до полімеризації і після короткочасної 5-секундної

полімеризації):

- У першому випадку формують пломбу. Невелику краплю Lateglint видавлюють з флакона-крапельниці на пензлик і рівномірно наносять на поверхню пломби. Для кращого розтікання глазури та заповнення нею дрібних дефектів пломби (розкриті бульбашки повітря, подряпини, викришування, тріщини) пломбу обдувають сухим стисненим повітрям 10-15 секунд, після чого проводять фотополімеризацію. Полірування пломби після нанесення глазури, як правило, не потрібно.

- У другому випадку глазуровку пломби виконують після 5-секундної полімеризації пломби і обробки її алмазної голівкою і абразивним інструментом. При цьому не допускається застосування силіконових голівок і абразивних паст. Поверхня пломби і сусідні ділянки емалі повинні бути абсолютно чистими і сухими. Нанесену глазур в цьому випадку полімеризують одночасно з остаточною полімеризацією пломби протягом 40 секунд. При покритті глазурю всієї поверхні зуба, її попередньо протрують фосфорнокислим гелем протягом 30 секунд і обробляють адгезивом.

Редакція 05.2020

Примітка. Глазур має в'язку консистенцію. Тому рекомендується флакон витримати в горизонтальному положенні або нахиленим ковпачком вниз для заповнення носіку пробки-крапельниці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»

61010 м. Харків, вул. Текстильна, 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

Тільки для професійного використання



UA.TR.002

