



# Proclean<sup>®</sup> Z

## Паста полировальная цирконовая

### Назначение

Паста Proclean Z предназначена для эффективной очистки и полировки зуба, удаления зубных отложений, камней и налёта курильщика с минимальными повреждениями эмали.

Паста Proclean Z со фтором оказывает, кроме этого, еще и профилактическое действие.

### Состав

Паста Proclean Z приготовлена на основе силиката циркония с размером частиц 3-5 мкм. Также в состав пасты входит ментол.

В варианте Proclean Z со фтором в состав пасты входит фторвыделяющий наполнитель.

### Способ применения

Перед началом обработки наносят на поверхность зуба небольшое количество пасты для максимальной эффективности чистки. Выдавливают небольшое количество пасты из шприца в резиновую чашку или на щётку. Обрабатывают чашкой (щёткой) поверхность зуба около 10 секунд,  
(к

). Продолжают процедуру до тех пор, пока все открытые поверхности зубов будут тщательно очищены и отполированы. Остатки пасты легко смываются водой.

Резиновая чашка или щётка с мягкой щетиной могут быть использованы для очистки на жевательной поверхности. Для очистки межзапроксимальной области необходимо использовать не покрывающую воском зубную нить.

### Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»  
61010 г. Харьков  
ул. Текстильная, 82  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)



**Только для  
профессионального  
использования**





# Proclean<sup>®</sup> Z

## Паста полірувальна цирконова

### Призначення

Паста Proclean Z призначена для ефективного очищення і полірування зуба, видалення зубних відкладень, каменів і нальоту курця з мінімальними пошкодженнями емалі.

Паста Proclean Z зі фтором чинить, крім цього, ще й профілактичну дію.

### Склад

Паста Proclean Z виготовлена на основі силікату цирконію з розміром часток 3-5 мкм. Також до складу пасту входить ментол.

У варіанті Proclean Z зі фтором до складу пасту входить наповнювач, що виділяє фтор.

### Спосіб застосування

Перед початком обробки наносять на поверхню зуба невелику кількість пасту для максимальної ефективності чищення. Видавлюють невелику кількість пасту зі шприца в гумову чашку або на щітку. Обробляють чашкою (щіткою) поверхню зуба близько 10 секунд, (край чашки повинен опускатися нижче за вільний край ясен в ясневій борозні). Продовжують процедуру до тих пір,

доки всі відкриті поверхні зубів будуть ретельно очищені і відполіровані. Залишки пасту легко змиваються водою.

Гумова чашка або щітка з м'якою щетиною можуть бути використані для очищення на жувальній поверхні.

Для очищення межাপроксимальної області необхідно використовувати неокрилену нитку.

### Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»  
61010 м. Харків  
вул. Текстильна, 82  
Тел. + 380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)



**Тільки для  
професійного  
використання**

