

Инструкция по применению



Ftoroplen®

Назначение

Лак Ftoroplen предназначен для фторпрофилактики кариеса, снятия гиперчувствительности зубов, а также как фторвыделяющий материал с целью профилактики воспалительных процессов в зубах, подготовленных под протез.

Свойства

Ftoroplen-однокомпонентный лак на основе биологически индифферентных полимеров. Образует пленку в результате подсушивания воздухом. Содержит препарат фторида натрия и фторида кальция, который способствует восстановлению зубной эмали и предохраняет зубы от развития

кариеса, устраняет гиперчувствительность зубов.

Способ применения

Поверхность зубов очищают от налета и отложений, используя щетки, чашечку и пасту для клинической чистки. Обработанную поверхность промывают водой и сушат струей воздуха. Наносят один слой лака равномерно на всю поверхность зуба при помощи кисточки или аппликатора, сушат сжатым воздухом в течение 1,5-2 минут. Для защиты аппроксимальных поверхностей и улучшения равномерности пленки наносят аналогично второй слой лака. Правильно нанесенная пленка лака сохраняется на поверхности зуба до 5 суток.

Рекомендации

При хранении происходит небольшое оседание фторвыделяющего агента, поэтому перед применением содержимое флакона необходимо взболтать.

Пациенту в течение двух часов после манипуляции не рекомендуется принимать пищу и, в целях сохранения лаковой

Редакция 08.2020

пленки, щадяще проводить гигиенические процедуры.

По истечении рекомендованного врачом времени нахождения пленки на зубах, пациенты самостоятельно убирают ее путем более интенсивной чистки зубной щеткой.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**



Інструкція по застосуванню



Ftoroplen®

Лак профілактичний,
що виділяє фтор

Призначення

Лак Ftoroplen призначений для фторпрофілактики карієсу, зняття гіперчутливості зубів, а також як матеріал, що виділяє фтор, з метою профілактики запальних процесів в зубах, які підготовлені під протез.

Властивості

Ftoroplen-однокомпонентний лак на основі біологічно індиферентних полімерів. Утворює плівку в наслідок підсушування повітрям. Містить препарат фториду натрію та фториду кальцію, який сприяє відновленню зубної емалі та оберігає зуби від розвитку карієсу, усуває гіперчутливість зубів.

Спосіб застосування

Поверхню зубів очищують від нальоту та відкладень, використовуючи щітки, чашечку та пасту для клінічної чистки. Оброблену поверхню промивають водою та сушать струменем повітря. Наносять один шар лаку рівномірно на всю поверхню зуба за допомогою пензлика або аплікатора, сушать стисненим повітрям протягом 1,5-2 хвилин. Для захисту апроксимальних поверхонь та покращення рівномірності плівки, наносять аналогічно другий шар лаку. Правильно нанесена плівка лаку зберігається на поверхні зуба до 5 дб.

Рекомендації

При зберіганні відбувається невелике осідання агенту, що виділяє фтор, тому перед застосуванням вміст флакону необхідно збовтати.

Пацієнту протягом двох годин після маніпуляції не рекомендується приймати їжу та, у цілях зберігання лакової плівки, обережно проводити гігієнічні процедури.

Редакція 08.2020

По закінченню рекомендованого лікарем часу знаходження плівки на зубах, пацієнти самостійно видаляють її шляхом більш інтенсивної чистки зубною щіткою.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.
Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
Тел. + 380577332697
www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

