



Tempolat®-SC

Цемент пломбировочный временный
цинк-сульфатный

Назначение

Tempolat-SC предназначен для временного пломбирования при лечении кариеса, покрытия лекарственных препаратов в кариозной полости, временной фиксации коронок и мостовидных протезов.

Свойства

Tempolat-SC представляет собой порошок водозатворимого цемента на цинк-сульфатной основе. Tempolat-SC хорошо сцепляется с тканями зуба и практически не дает усадки.

Способ применения

Порошок смешивают с водой до получения необходимой консистенции. Слегка продув полость зуба воздухом, при помощи гладилки заполняют ее цементом. Далее пасту разглаживают влажным ватным тампончиком. Пломба отвердевает в течение

примерно 3 минут. Еще 3-4 минуты необходимы для набора пломбой первичной твердости и водостойкости. Во время твердения пломбы нельзя ее поправлять или уплотнять, так как это может привести к разрушению цемента.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г.Харьков
ул. Текстильная, 82
тел. +380577332697
www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**





Tempolat® -SC

Цемент пломбувальний тимчасовий
цинк-сульфатний

Призначення

Tempolat-SC призначений для тимчасового пломбування при лікуванні карієсу, покриття лікарських препаратів в каріозній порожнині, тимчасовій фіксації коронок і мостоподібних протезів.

Властивості

Tempolat-SC представляє собою порошок на цинк-сульфатній основі, що затворюється водою.

Tempolat-SC добре зчіплюється з тканинами зуба і практично не дає усадки.

Спосіб застосування

Порошок змішують з водою до утворення потрібної консистенції. Злегка продувши порожнину зуба повітрям, за допомогою гладилки заповнюють її цементом. Далі пасту розгладжують вологим ватяним

тампоном. Пломба твердне протягом приблизно 3 хвилин. Ще 3-4 хвилини необхідні для набору пломбою первинної твердості і водостійкості. Під час затвердіння пломби не можна її поправляти або ущільнювати, оскільки це може привести до руйнування цементу.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
тел. +380577332697
www.latus.com.ua

**Тільки
для професійного
використання**

