



Tempolat®-F

Цемент фиксирующий временный

Назначение

Tempolat-F предназначен для временной фиксации коронок, мостов и других несъемных протезов.

Свойства

Tempolat-F приготовлен на основе цинк-сульфатного цемента. Отверждается в присутствии влаги, поэтому нет необходимости сушить культю и коронку. Хорошо переносится тканями зуба и деснами.

Цемент Tempolat-F не содержит эвгенол.

Способ применения

Tempolat-F вносят в коронку, фиксируют на культе зуба в

течение 7-10 минут. Излишек цемента до отверждения удаляют ватным шариком. Отвержденный материал достаточно прочный и может использоваться для длительной временной фиксации, при этом легко снимается, не травмируя твердые ткани культи зуба.


Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
тел. +380577332697
www.latus.com.ua

Только для профессионального использования

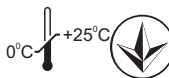



Tempolat®-F

Цемент фіксуючий
тимчасовий

Призначення

Tempolat-F призначений для тимчасової фіксації коронок, мостів і інших незнімних протезів.

Властивості

Tempolat-F виготовлений на основі цинк-сульфатного цементу. Твердне у присутності вологи, тому немає необхідності сушити культю і коронку. Добре переноситься тканинами зуба і яснами.

Цемент Tempolat-F не містить евгенол.

Спосіб застосування

Tempolat-F вносять до коронки, фіксують на культі

зуба протягом 7-10 хвилин.

Надлишок цементу до затвердіння видаляють ватяною кулькою.

Затверділий матеріал достатньо міцний і може використовуватися для тривалої тимчасової фіксації, при цьому легко знімається, не травмуючи тверді тканини культі зуба.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
тел. + 380577332697
www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

