

## Dentalex-12

### Герметик стоматологічний світлотверднучий

#### Призначення

Dentalex-12 призначений до застосування у дитячій терапевтичній стоматології, як засіб профілактики карієсу. Герметик застосовується для барерної герметизації фісур та пломбування в початковій стадії карієсу.

#### Властивості

Dentalex-12 відноситься до групи малонаповнених текучих композитів, має покращену адгезію та зносостійкість.

Герметик Dentalex-12 має високу технологічність, що дозволяє застосовувати його в умовах клініки та шкільних стоматологічних кабінетів. Dentalex-12 твердне при кімнатній температурі протягом 30 с за допомогою стоматологічного фотополімеризатора. Затверділа поверхня стійка до чищення зубною щіткою.

#### Спосіб застосування

##### Підготовка зубної емалі

Перед тим, як нанести герметик, зуби старанно очищують зубною пастою. Після чого промивають та висушують зуби. Витискають зі шприца через канюлю необхідну кількість трюючого гелю у кювету або на скляну пластину. Потім пензликом наносять на жувальну поверхню, що буде герметизуватися. Можна наносити гель безпосередньо на поверхню зубу, що оброблюється. Витримують гель на емалі 30с. Протруєну поверхню промивають водою зі стоматологічної установки (тампонами не користуватись!) та висушують стисненим повітрям. Правильно протруєна поверхня емалі повинна мати тьмянний крейдяний вигляд. Канюлю після використання промивають водою за допомогою шприца.

##### Аплікація герметика

Видавлюють зі шприца через канюлю

невелику кількість пасти Dentalex-12 на фісуру, що буде герметизуватися, та за допомогою стоматологічного зонду заповнюють фісуру та заглиблення герметиком. При наявності надлишку пасти прибирають її ватною кулькою, трохи промокаючи поверхню зубу.

Твердіння пасти Dentalex-12 необхідно здійснювати стоматологічним фотополімеризатором, що має потужність лампи не менш, як 50 Вт та довжину хвилі у діапазоні 400-500 нм. Час твердіння кожної аплікації 30 с.

Після твердіння дають витримку протягом 1 хвилини після чого прибирають з поверхні зубів липкий шар ватною кулькою.

#### Рекомендації

*Щоб запобігти передчасного твердіння герметика відразу після відбору пасти закрити шприц ковпачком.*

*При тривалому зберіганні трюючого гелю можливе його загуснення. Для отримання необхідної консистенції треба видавити гель на скло та трохи перемішати.*

#### Умови зберігання

Dentalex-12 в упакованому вигляді повинен зберігатися в закритих прохолодних приміщеннях, захищених від впливу атмосферних опадів, прямих сонячних променів і на відстані не менш, як 1 м від опалювальних приладів.



ПП "Латус",  
61010, м.Харків,  
вул. Текстильна, 82,  
Тел. +380577332697  
www.latus.com.ua



## Dentalex-12

### Герметик стоматологический светоотверждаемый

#### Назначение

**Dentalex-12** предназначен к применению в детской терапевтической стоматологии, как средство профилактики кариеса. Герметик применяется для барьерной герметизации фиссур и пломбирования в начальной стадии кариеса.

#### Свойства

**Dentalex-12** относится к группе малонаполненных текучих композитов, обладает повышенной твердостью и износостойкостью.

Герметик **Dentalex-12** обладает высокой технологичностью, позволяющей применять его в условиях клиники и школьных стоматологических кабинетов. **Dentalex-12** отверждается при комнатной температуре в течение 30 с при помощи стоматологического фотополимеризатора. Отвержденная поверхность устойчива к чистке зубной щеткой.

#### Способ применения

##### Подготовка эмали зуба

Перед тем, как нанести герметик, зубы тщательно очищают зубной пастой. После чего промывают и высушивают зубы. Выдавливают из шприца через канюлю необходимое количество травильного геля в кювету или на стеклянную пластину. Затем кисточкой наносят на жевательную поверхность, подлежащую герметизации. Можно наносить гель непосредственно на обрабатываемую поверхность зуба. Выдерживают гель на эмали 30 с. Протравленную поверхность промывают водой из стоматологической установки (тампоны не применять!) и высушивают сжатым воздухом. Правильно протравленная поверхность эмали должна иметь тусклый меловой вид. Канюлю после использования промывают водой при помощи шприца.

##### Аппликация герметика

Выдавливают из шприца через канюлю небольшое количество пасты **Dentalex-12** на герметизируемую фиссуру и при помощи стоматологического зонда заполняют фиссуру и углубления герметиком. При наличии излишков пасты аккуратно удаляют ее ватным шариком, слегка промокая поверхность зуба.

Отверждать пасту **Dentalex-12** необходимо стоматологическим фотополимеризатором, имеющим мощность лампы не менее 50 Вт и длину волны в диапазоне 400 - 500 нм. Время отверждения каждой аппликации 30 с.

После отверждения дают выдержку около 1 мин, а затем ватным шариком удаляют с поверхности зубов липкий слой.

#### Рекомендации

*Во избежание самополимеризации герметика сразу после отбора пасты закрыть шприц колпачком.*

*При длительном хранении травильного геля возможно его загустевание. Для получения необходимой консистенции выдавите гель на стекло и немного перемешайте.*

#### Условия хранения

**Dentalex-12** в упакованном виде должен храниться в закрытых прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.



ЧП "Латус",  
61010, г.Харьков,  
ул. Текстильная, 82,  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)



UA.TR.002