



# Argelat®

## Набор для серебрения

### Назначение

Argelat предназначен к применению в стоматологической практике для серебрения:

- инфицированных и плохо проходящих каналов зубов;
- молочных зубов и зубов, пораженных пришеечным кариесом.

### Свойства

Комплект Argelat включает жидкость № 1, жидкость № 2 и масло вазелиновое.

Метод серебрения основан на выпадении частиц восстановленного ионного серебра, которое обеспечивает антисептическую обработку кариозного дентина и неудаленных органических остатков пульпы в корневом канале.

Argelat не рекомендуется применять для обработки передних зубов из-за окрашивающего эффекта.

### Способ применения

Серебрение молочных зубов и зубов, пораженных пришеечным кариесом. При серебрении молочных зубов и зубов, пораженных пришеечным кариесом, слизистую поверхность защищают вазелиновым маслом, чтобы избежать ожогов и окрашивания при попадании препарата.

Сухую поверхность зуба обрабатывают жидкостью № 1 с помощью ватного тампона, турунды или микроапликатора. Через 2-3 минуты повторно

обрабатывают поверхность зуба жидкостью № 1, используя при этом чистый ватный тампон, турунду или микроапликатор. Через 2-3 минуты, не удаляя остатков жидкости, этот же участок обрабатывают жидкостью № 2, используя чистый ватный тампон, турунду или микроапликатор. Просушивают воздухом.

### Серебрение корневых каналов

Турундой, смоченной жидкостью № 1, обрабатывают корневой канал, нагнетая в него жидкость. Через 2-3 минуты повторно обрабатывают корневой канал жидкостью № 1, используя при этом чистую турунду. Через 2-3 минуты, не удаляя остатков жидкости, канал обрабатывают жидкостью № 2 используя чистую турунду.

После чего закрывают полость зуба ватным тампоном, а затем временным пломбирочным материалом. Через 1-2 дня можно пломбировать корневой канал.


### Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материалы плотно закрыть.

ЧП "Латус»

61010, г. Харьков, ул. Текстильная,  
82. Тел. +380577332697,  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

**Только для профессионального использования**

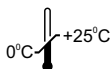



# Argelat®

## Набір для сріблення

### Призначення

Argelat призначений до застосування в стоматологічній практиці для сріблення:

- інфікованих і погано прохідних каналів зубів;
- молочних зубів і зубів, уражених пришийковим карієсом.

### Властивості

Комплект Argelat включає рідину № 1, рідину № 2 і масло вазелінове.

Метод сріблення заснований на випаданні частинок відновленого іонного срібла, яке забезпечує антисептичну обробку каріозного дентину і невидалених органічних залишків пульпи в кореневому каналі.

Argelat не рекомендується застосовувати для обробки передніх зубів через забарвлюючий ефект.

### Спосіб застосування

Сріблення молочних зубів і зубів, уражених пришийковим карієсом

При срібленні молочних зубів і зубів, уражених пришийковим карієсом, слизову поверхню захищають вазеліновим маслом, щоб уникнути опіків і фарбування при попаданні препарату.

Суху поверхню зуба обробляють рідиною № 1 за допомогою ватного тампона, турунди або мікроаплікатора. Через 2-3 хвилини повторно обробляють поверхню зуба рідиною № 1, використовуючи

при цьому чистий ватний тампон, турунду або мікроаплікатор. Через 2-3 хвилини, не видаляючи залишків рідини, цю ж ділянку обробляють рідиною № 2, використовуючи чистий ватний тампон, турунду або мікроаплікатор. Просушують повітрям.

### Сріблення корневих каналів

Турундою, змоченою рідиною № 1, обробляють кореневий канал, нагнітаючи в нього рідину. Через 2-3 хвилини повторно обробляють кореневий канал рідиною № 1, використовуючи при цьому чисту турунду.

Через 2-3 хвилини, не видаляючи залишків рідини, канал обробляють рідиною № 2, використовуючи чисту турунду.

Після чого закривають порожнину зуба ватним тампоном, а потім тимчасовим пломбувальним матеріалом. Через 1-2 дні можна пломбувати кореневий канал.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріали щільно закрити.

ПП "Латус"

61010, м. Харків, вул. Текстильная, 82.

Тел. +380577332697,

www.latus.com.ua

**Тільки для професіонального використання**

