

Инструкция по применению



Редакция 01.2022

Tempolat®

Цемент пломбировочный временный

Дентин-паста без эвгенола

Назначение

Паста Tempolat предназначена для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов.

Свойства

Паста Tempolat приготовлена на основе цинк-сульфатного цемента, отверждается в полости зуба при воздействии влаги в течение 30-40 минут и обеспечивает плотное краевое прилегание, благодаря некоторому расширению в процессе отверждения материала.

Паста не токсична, хорошо переносится тканями зуба и деснами.

Паста Tempolat не содержит эвгенол.

Применение

Пасту Tempolat накладывают в полость зуба с лекарственным препаратом при помощи гладилки (лучше слегка подогретой) поверх ватного тампона слоем толщиной 2-3 мм. Перед внесением в полость размять пасту шпателем. До набора достаточной твердости пасты пациенту не рекомендуется принимать пищу в течение 1 часа.

Отвердевший материал легко выводится из полости при помощи экскаватора или зонда. Остатки материала очищают бором и смывают водой.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
тел. +380577332697
www.latus.com.ua



UA.TR.002



**Только для
профессионального
использования**

Інструкція по застосуванню



Редакція 01.2022

Tempolat®

Цемент пломбувальний тимчасовий
Дентин-паста без евгенолу

Призначення

Паста Tempolat призначена для ізоляції лікарського засобу в каріозній порожнині і тимчасового пломбування зубів.

Властивості

Паста Tempolat виготовлена на основі цинк-сульфатного цементу, твердне в порожнині зуба під впливом вологи протягом 30-40 хвилин та забезпечує щільне крайове прилягання, завдяки деякому розширенню у процесі твердіння матеріалу.

Паста нетоксична, добре переноситься тканинами зуба і яснами.

Паста Tempolat не містить евгенол.

Застосування

Пасту Tempolat накладають в порожнину з лікарським препаратом за допомогою гладилки (краще трохи підігрітої) поверх ватного тампона шаром завтовшки 2-3 мм. Перед внесенням у порожнину розім'яти пасту шпателем. До набору Tempolat достатньої твердості пацієнту не рекомендується приймати їжу протягом 1 години.

Затверділий матеріал легко виводиться із порожнини за допомогою екскаватора або зонда. Залишки матеріалу очищують бором і змивають водою.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
тел. +380577332697
www.latus.com.ua



**Тільки для
професійного
використання**



UA.TR.002

