

Инструкция по применению



Ahygrol®

Жидкость для
обезжиривания и сушки

Назначение

Ahygrol предназначен для высушивания и обезжиривания полостей и каналов зуба перед пломбированием или культы зуба перед установкой несъемных протезов, а также для очистки поверхностей протеза от загрязнений перед фиксацией.

Свойства

Ahygrol представляет собой смесь легколетучих органических растворителей, индифферентную к окружающим мягким тканям полости рта, не вызывающую болезненную реакцию при попадании на слизистую оболочку. Легко растворяется в воде. Время высыхания - 10 секунд.

Ahygrol содержит также добавку природного поверхностно-

активного вещества, улучшающую смачиваемость, десорбцию воды и следов жировых загрязнений.

Применение жидкости Ahygrol позволяет быстро и качественно обезжирить и просушить поверхность зуба и протеза перед фиксацией.

Способ применения

Обезжиривание и высушивание выполняют после препаровки, промывки водой и сушки полости или культы зуба, внутренней поверхности несъемного зубного протеза. Ватным тампоном, пропитанным жидкостью Ahygrol, или при помощи пипетки обрабатывают полость или поверхность зуба и зубной протез. После чего на обработанную поверхность направляют слабую струю сжатого воздуха, при помощи которой слой жидкости вытесняется на периферию поверхности, тем самым максимально удаляя воду и жировые загрязнения.

Внимание!

Ahygrol является огнеопасной жидкостью. При работе с ней нельзя пользоваться открытым огнем и электронагревательными

Редакция 09.2020

приборами с открытой спиралью.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал плотно закрыть.



ЧП «Латус»

61010, г. Харьков

ул. Текстильная, 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**





Ahygrol®

Рідина для знежирення
і сушки

Призначення

Ahygrol призначений для висушування та знежирення порожнин та каналів зуба перед пломбуванням або культі зуба перед установленням незнімних протезів, а також для очистки поверхонь протеза від забруднень перед фіксацією.

Властивості

Ahygrol являє собою суміш легколетучих органічних розчинників, індиферентних до навколишніх м'яких тканин ротової порожнини, яка не викликає хворобливої реакції при попаданні на слизову оболонку. Легко розчиняється у воді. Час висихання - 10 секунд.

Ahygrol має у своєму складі також домішку природної поверхньо-

активної речовини, яка покращує змочування, десорбцію води та слідів жирових забруднень.

Застосування рідини Ahygrol дозволяє швидко та якісно знежирити та просушити поверхню зуба та протеза перед фіксацією.

Спосіб застосування

Знежирення та висушування здійснюються після препаровки, промивки водою та сушки порожнини або культі зуба, всередині поверхні незнімного зубного протеза. Ватним тампоном, який просочений рідиною Ahygrol, або за допомогою піпетки обробляють порожнину або поверхню зуба та зубного протеза. Після чого на оброблену поверхню направляють слабку струю стислого повітря, за допомогою якого шар рідини витісняється на периферію поверхні, тим самим максимально видаляя воду та жирові забруднення.

Увага!

Ahygrol є вогненебезпечною рідиною. При роботі з нею забороняється користуватися відкритим вогнем та електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріал щільно закрити.



ПП «Латус»

61010 м. Харків

вул. Текстильна, 82

Тел. +380577332697

www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

