



Cresolat®

Рідина для
антисептичної обробки
кореневих каналів

Призначення

Cresolat застосовується для антисептичної обробки кореневих каналів та каріозних порожнин в терапевтичній стоматології.

Властивості

Cresolat представляє собою рідину, яка легко проникає навіть в погано прохідні канали. Має антисептичні та седативні властивості.

Спосіб застосування

Ватяну турунду, просочену рідиною Cresolat, слід помістити в пульпову камеру на деякій відстані від апексу. Закрити порожнину тимчасовими цементом і залишити на 3-4 дні. При наступному відвідуванні турунду витягти і приступити до запланованого лікування зуба.


Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C.

Після використання матеріал щільно закрити.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
тел. + 380577332697
www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

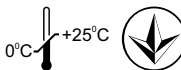



Cresolat®

Жидкость для
антисептической обработки
корневых каналов

Назначение

Cresolat применяется для антисептической обработки корневых каналов и кариозных полостей в терапевтической стоматологии.

Свойства

Cresolat представляет собой жидкость, легко проникающую в каналы.

Обладает антисептическими и седативными свойствами.

Способ применения

Ватную турунду, пропитанную жидкостью Cresolat, следует поместить в пульповую камеру на некотором расстоянии от апекса. Закрывать полость временными цементом и оставить на 3-4 дня. При следующем посещении турунду извлечь и приступить к запланированному лечению зуба.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C.

После использования материал плотно закрыть.

ЧП «Латус»

61010 г. Харьков

ул. Текстильная, 82

тел.+380577332697

www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**

