



Гель травильный 37%

Назначение

Гель травильный предназначен для протравливания эмали и дентина перед пломбированием зуба.

Состав

Гель травильный содержит 37% ортофосфорной кислоты.

Свойства

Гель обладает тиксотропными свойствами, что позволяет зафиксировать его на поверхности зуба. Голубой цвет геля облегчает визуальный контроль точного нанесения.

Применение

Необходимое количество геля с помощью аппликатора наносят на эмаль и/или дентин. Выдержка геля на эмали составляет 30 секунд, на дентине - 15 секунд. После этого гель тщательно смывают струей воды под давлением в течение 10-15 секунд и сушат 15 секунд сжатым воздухом до слегка увлажненного состояния дентина и потускнения эмали, исключая контакт со слюной. При повышенной резистенции эмали травление необходимо повторить не более 30 секунд.

Рекомендации

При хранении геля возможно его загустение. Для получения требуемой консистенции и предотвращения разбрызгивания геля при дозировании поршень шприца оттянуть на себя на 2-3 мм, выдавить гель на стекло и перемешать.


Условия хранения

Хранить при температуре не выше +25°C. После использования гель плотно закрыть.

Дополнительная упаковка.

ЧП «Латус»
61010 г. Харьков
ул. Текстильная, 82
Тел. +380577332697
www.latus.com.ua

**Только для
профессионального
использования**

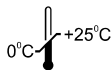



Гель труючий 37%

Призначення

Гель труючий призначений для протруювання емалі та дентину перед пломбуванням зуба.

Склад

Гель труючий містить 37% ортофосфорної кислоти.

Властивості

Гель володіє тіксотропними властивостями, що дозволяє зафіксувати його на поверхні зуба. Блакитний колір гелю полегшує візуальний контроль точного нанесення.

Застосування

Необхідну кількість гелю за допомогою аплікатора наносять на емаль і/ або дентин. Витримка гелю на емалі становить 30 секунд, на дентині-15 секунд. Після цього гель ретельно змивають струменем води під тиском протягом 10-15 секунд і сушать 15 секунд стисненням повітрям до злегка зволоженого стану дентину і потьмяніння емалі, виключаючи контакт зі слиною. При підвищеній резистенції емалі протруєння необхідно повторити не більше 30 секунд.

Рекомендації

При зберіганні гелю можливо його загустіння. Для отримання необхідної консистенції і запобігання розбризкування гелю при дозуванні, необхідно поршень шприца відтягнути на себе на 2-3 мм, видавити гель на скло і перемішати.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання гель щільно закрити.

Додаткова упаковка.

ПП «Латус»
61010 м. Харків
вул. Текстильна, 82
Тел. + 380577332697
www.latus.com.ua

**Тільки для
професійного
використання**

